




# Notice d'utilisation

## MASQUE DE PROTECTION TEXTILE LAVABLE ref MB

La réalisation et la protection du masque barrière s'appuie sur les préconisations AFNOR SPEC S76001

**CAT 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public > 90%**

---

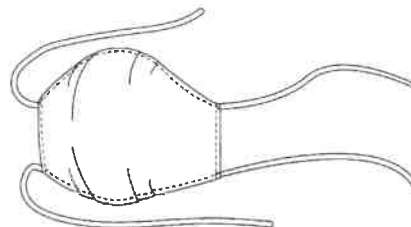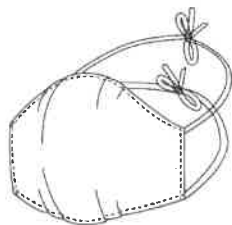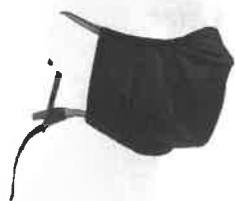

## AVANT-PROPOS

**Le masque "barrière" est destiné à protéger les personnes saines ou asymptomatiques. Il vient en complément des mesures barrières ou de distanciation sociale.**

**les masques FFP2 sont réservés en priorité aux personnels de santé réalisant des gestes invasifs**

**Le masque barrière n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.**

Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale.


**IMPORTANT** Le masque barrière n'est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes notifiés ou laboratoires. Sa conception selon les règles de l'art, sa fabrication et son contrôle de qualité de la production reste à la responsabilité du fabricant.

**IMPORTANT** Le fabricant est autorisé à réaliser les essais de vérification et de validation au sein de son entreprise ou en collaboration avec un laboratoire d'essai disposant des moyens de test appropriés.

**IMPORTANT** Une attention est portée sur le fait que le masque barrière aura une efficacité maximale s'il est porté en contact direct avec une peau nue.

**AVERTISSEMENT** Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

## CONSEIL D'UTILISATION

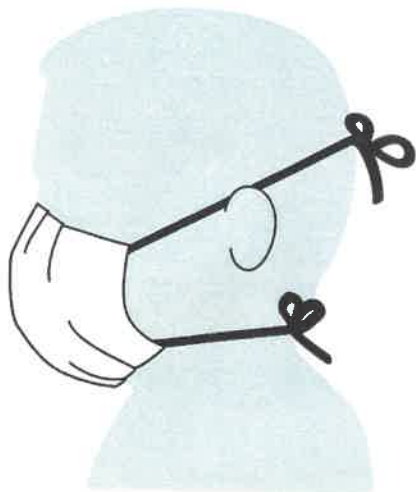

Doté de deux liens à nouer, le masque barrière doit être ajusté de façon à couvrir le nez, la bouche et le menton et il ne doit pas comporter des soupape(s) inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s).

Ajustez sur votre visage le masque barrière,  
Assurez-vous qu'il recouvre le nez et la bouche.

L'utilisateur peut porter le masque pendant une durée de 4 heures à condition de ne pas le manipuler pendant cette période.

Chaque fois que vous retirez votre masque vous devez en changer et en positionner un propre.

**Ces opérations doivent être réalisées après vous être soigneusement lavé les mains.**

**Lavez votre masque à 60° pendant minimum 30 mn avant de l'utiliser**

### Matériaux

Tissu externe : 100% Polyester (certifié oeko-tex)

Efficacité de protection aux aérosols : Particules de 3µm: 95%, Particules de 1µm: 91,6%

Perméabilité à l'air 212l/m<sup>2</sup>/s

Rapport RP1915 (DGA)

Les matériaux utilisés résistent aux manipulations et à l'usure pendant la durée de vie du masque barrière, 50 lavages.

### Entretien :

Lavage ménager à 60°.

Séchage Tambour (40°/60°) selon machine. ( **pas de micro ondes** )

### Stockage :

Dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

**Manipuler les masques avec les mains propres.**

**Ne portez pas un masque sans l'avoir lavé**

**En cas d'usure prématuré, de détérioration ou de trou le masque doit être remplacé**

**WWW.GROUPEMARCK.FR**

